



Sterisol Eye Wash - Effektivt, hvor du end har brug for det.

Sterisols øjenskylprogram er altid lige ved hånden.

Sterisol

Øjensskyl - på den rigtige måde!

Når et øje skades af stænk eller andre hændelser, har du brug for øjeblikkelig effektiv førstehjælpsbehandling.

Ved håndtering af alkaliske og andre ætsende stoffer skal et skyllesystem være tilgængeligt inden for armlængdeafstand.

Anvendelsesområder

Sterisol Eye Wash er et beroligende supplement til permanente øjenskyllestationer. Det er ideelt til mobile arbejdspladser, i køretøjer, både, midlertidige bygninger osv. Det er nemt at fjerne flaskerne fra vægbeslaget og bruge dem til kontinuerlig skylning på vej til lægen eller en permanent øjenskyllestation. Når en flaske er åbnet, skal den bruges straks og derefter kasseres. Udskiftes med en uåbnet flaske! Sørg for, at du har tilstrækkelige reserveflasker på lager til opfyldning efter behov!

Positionering

Øjenskyllsystemet skal placeres i umiddelbar nærhed af højrisikoprojekter. Det er vigtigt, at ruten til øjeskyllingen er fri for forhindringer. Den tilskadekomne skal selv kunne finde og få adgang til øjenskyllmidlet, måske uden at kunne se og mens vedkommende har øjensmerter.

Sterisol Eye Wash er et af de sikreste og hurtigste produkter til rådighed:

- > Al væsken når øjet i en kontinuerlig og jævn strøm.
- > Én flaske holder i lang tid - 6 eller 12 minutters skylning.
- > Hurtig opstart - et fast slag med hånden på beskyttelseshætten bryder sikkerhedsforseglingen.
- > Let at bære - til skylning af skadede øjne under transport til permanente øjenskyllfaciliteter

Brugervejledning



Flasken skal hvile på en plan overflade. Giv et fast slag med din hånd på den grønne beskyttelseshætte.



Fjern den grønne beskyttelseshætte.



Åbn øjenlågene. Skyl med hovedet vippet bød. Flasken skal placeres, så skyllekoppen hjælper med at holde øjenlågene åbne. Væsken skal løbe af sig selv.

Husk...

Når et skadeligt stof er kommet ind i øjet, er tre ting særligt vigtige:

- 1 Skylning skal begynde med det samme for at undgå forekomsten af alvorlig skade. Skyl kontinuerligt, selv når du flytter personen til permanente øjenskyllfaciliteter eller en læge.
- 2 Skylning skal fortsættes i lang tid. Varigheden varierer afhængigt af det stof, der er kommet ind i øjet. Lad en læge bestemme, hvornår skylningen skal stoppes. Du bør derfor altid have en række ekstra flasker i reserve til skylning under transport.
- 3 Ofte skal begge hænder være fri til at holde øjenlågene adskilt. Så ring efter hjælp hurtigt!





Sterisol Eye Wash-holder – 0,5 liter
Bærbart vægbeslag med to flasker og vægmonteret skilt.



Sterisol Eye Wash-holder – 1 liter
Bærbart vægbeslag med to flasker og vægmonteret skilt.



Sterisol Eye Wash-holder – 0,5 eller 1 liter
Engangsflaske, genopfyldning til vægbeslag.



Sterisol Eye Wash - 5-pak 1 liter
Bærbart vægbeslag med fem flasker og vægmonteret skilt.



Sterisol Eye Rinse - 30 milliliter
Til bortskylning af snavs i øjet. 12 flasker leveret i en monteringsvenlig vægdispenser. Indeholder 0,9 % isotonisk natriumchloridopløsning.

EYEWASH

1

BANK!
Med et hårdt slag, på en jævn overflade.

2

3

FJERN!
Tag låget af.

4

SKYL!
Væsken skal flyde af sig selv.

Søg lægen! Bortskaf ubrugt væske. Genbruges som plastaffald.

Opbevaringstemperatur: 5-35°C
Isotonisk natriumchloridopløsning: 0,9%
Indhold: 1L

STERILE **CE** **NB2460**

Sterisol AB
Kronängsg 3 • 59230 Vadstena
Sweden • +46 143 788 68
www.sterisol.se

LOT 24849-2

Symbolforklaring

Etiketten på Sterisol Eye Wash viser de symboler, der er fastsat i EU-direktivet. Her er forklaringer på symbolerne:

- STERILE** Steriliseret med damp eller tørvarme.
- CE** Opfylder kravene i EU-direktivet om medicinsk udstyr.
- 2460** Identifikationsnummer for bemyndiget organ (2460 Presafe)
- 2** Kun til engangsbrug.
- LOT** Efterfulgt af en figur, der angiver produktpartiets nummer.
- 2016-06-02** Fremstillingsdato. Angivet med fire cifre for årstallet og to for måned og dag. For eksempel 2016-06-02.
- 2016-05** Mindst holdbar til. Kun angivet med årstal og måned. Eksempel: 2016-05.
- FAB** Fabrikant

Produktfakta

Indhold: 0,5 eller 1 liter steril isotonisk saltopløsning (0,9 %). Tømningstiden er ca. 6 eller 12 minutter.

Levetid: Væsken har en levetid på 40 måneder i en uåbnet flaske. En "mindst holdbar til-dato" er tydeligt trykt på hver flaske. Efter denne dato skal flaskerne ombyttes hos Sterisol AB for at sikre, at indholdet er egnet til øjenskylning. Sterisol overvåger denne dato, hvis købet er registreret på Sterisols hjemmeside

CE-mærkning: Sterisol Eye Wash har CE-mærket på etiketten. Det betyder, at det opfylder kravene i EU-direktivet til fremstilling af medicinsk udstyr. Øjenskyllemidlet er kategoriseret i klasse 1, sterilt og er derfor blevet gennemgået af et tredjepartsorgan - i dette tilfælde 2460, som er Presafe.

Husk at arbejde forebyggende!

Når øjeskyllesystemet placeres, skal der tages hensyn til de lokale forhold. Hvor er de fleste højrisikoprojekter? Hvad er den hurtigste vej til øjenskylning? Det er også vigtigt at oplagre de stoffer, du arbejder med. På den sidste side kan du finde nogle eksempler på stoffer, der kan føre til alvorlig skade ved øjenkontakt.

Koncentreret stråle i ca. 6 minutter (med 0,5 liter) eller 12 minutter (med 1 liter) pr. flaske. Hele indholdet af flasken når øjet for effektiv skylning.

Behandling:

Skader fra alkaliske stoffer

Når alkaliske stoffer - som lud, kaustisk soda, ammoniak, aminer, ubleget kalk eller opvaskemiddel - kommer i øjnene, kan der let opstå alvorlige skader. Disse stoffer trænger hurtigt ind i øjet. Nogle alkalier, såsom ammoniak, er blevet fundet i øjet efter blot 25 sekunder. Uden hurtig skylning kan skaderne være omfattende og kan føre til tab af synet. Øjenskyllenanordningen skal derfor være tilgængelig inden for armslængdeafstand, og det skal være muligt at tage den med patienten på turen til lægen.

Handling:

- Skyl straks øjet og fortsæt med at gøre det under transporten til hospitalet
- Hold øjenlågene godt adskilt under skylning
- Lad en læge bestemme, hvornår skylningen skal stoppe.

Skader fra syrer og andre irriterende stoffer

Syresprøjt i øjet medfører en risiko for ætsende forbrændinger og ardannelse med synsnedsættelse som følge heraf. Syre påvirker hornhindealbuminet. Dette koagulerer, og der dannes en beskyttende barriere. Barrieren forsinker syrens gennemtrængning i øjet, men øjeblikkelig skylning af øjet er nødvendigt.

Handling:

- Skyl straks øjet og fortsæt med at gøre det under transporten til hospitalet
- Hold øjenlågene godt adskilt under skylning
- Lad en læge bestemme, hvornår skylningen skal stoppe.

Mekaniske skader

Mekaniske skader skyldes primært fremmedlegemer som støv, partikler og snavs. For eksempel kan metalpartikler producere en stikkende følelse, smerte og ardannelse, med en vis synsforringelse som følge heraf.

Handling:

- Skyl straks øjet, indtil fremmedlegemet er væk.
- Hold øjenlågene godt adskilt under skylning
- Søg læge, hvis smerte eller irritation fortsætter